



# Caya<sup>®</sup> Gel

## קוטל זרע טבעי

### חשיבות:

- איננו מכיל מופני מחולות המועברות ברגע מין.
- איננו אמצעי מניעה בטוח כאשר עושים בו שימוש ללא אמצעי חוץ נוסף.
- מסיסים בטמיים ומתחאים לשימוש עם דיaphragma / קונדום או כל אמצעי מניעה על בסיס לטקס טבעי או פוליאוריתן.

### רכיבים:

מים, חומצה לקטית, נתרן לקטט, תאית, חומצה סורבית, ונילן.

### תכולת האריזה:

כל אריזה של Caya ג'ל מכילה 60 גרם ג'ל.  
האריזה מכילה מוליך לשימוש חוזר.  
אינו מכיל 9-chloro-9-chloroheptadecanoate.

### אחסון:

יש לאחסן את הניל במקומות יבש, בטמפרטורה בין 4-25 מעלות צלזיום. תacid יש להפקיד להשאי את השפורת סגורה. ניתן לשימוש תוך 3 חודשים מזמן הפתיחה.

### מחקר רפואי:

Caya ג'ל והינו קוטל זרע המבוסס על הרכיב של חומצה לקטית. הוכח כי יעילותו אינה מופחתת מיילות קוטלי זרע המכילים נונוקסינול-9 (דייטריך 1989). כמו כן נמצא במחקר ההשוائي של קוטלי זרע שונים כי Caya ג'ל הינו בעל פוטנציאל נזוך יותר לגרימת תופעות לוואי.

להשיג בbatis המרתקת, ללא מרשם רופא

EAN 4013273001250

 KESSEmedintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Moerf.-Walldorf  
Germany

 0483  
Medical Device  
Made in Germany

[www.caya.eu](http://www.caya.eu)

Caya Gel MOH number: 28750003

[www.terragreenmed.com](http://www.terragreenmed.com)

Caya ג'ל הינו קוטל זרע טבעי, ללא נונוקסינול 9, המשמש כאמצעי למניעת הרין בשימוש יחד עם דיaphragma או כל אמצעי מניעה אחר (כגון קונדום, ספוגית, כובען צוארי וכדומה)

### התויה רפואי:

- הוכחה ציבורית ובלתי לשימוש למניעת הרין בשילוב עם דיaphragmat Caya
- איננו מכיל נונוקסינול 9 אך עיליל באותה מידה
- מסיסים ובמיוחד מתאים לשימוש עם דיaphragma / קונדום / כובען צוארי העשויים מוגני טבעי או מפוליאוריתן
- Caya ג'ל הינו על בסיס מים והושימוש בו ניעם ואני מילך
- טבעי ולא חומרם מסחריים
- השימוש בג'ל קוטל זרע הוכיח כמשמעותי השימוש באמצעי מניעה חוץים כגון דיaphragma, קונדום או כובען צוארי

### מבנה הפעולה:

Caya ג'ל ווצר מהסומן מכני נוסף באמצעות תאי (cellulose) ומכהית את רמת החומציות בнерטיק (ערק ה-H וירד). לחומציות המוגברת וצימיות הגל יש השפעה המעכבה את תנומתיות הזרע.

### אופן השימוש:

לפני החדרת הדיaphragma אל תוך הנרתיק, מריחי כ-4 מ"ל (בערך כפית) ג'ל באציגו הדיאפרגמה. לאחר מכן עקיבי הוראות השימוש של הדיaphragma. אם נדרש להמשיך ולקיים שוב יחסים מיד לאחר המسلح הראשוני, עליך להוסיף עוד Caya ג'ל לעומק הנרתיק באמצעות הפלילר, מבליל שתוכזיא את הדיaphragma ממקומה בнерטיק. רחץ את הפלילר במים חמים וסובן לאחר כל שימוש. ניתן לעשות במוליך שימוש חוזר.

### התויה נתגך:

לא היו דווחים על נשים שחוו תופעות לוואי במהלך השימוש ב- Caya ג'ל. במדידה וקיימות בעיה בעת השימוש ב- Caya ג'ל, מומלץ להפסיק את השימוש בו ולהיוועץ עם הרופא המתפל או עם הרוקח.